

STEP 2

検査キットに同梱した内容物をご確認

遺伝子検査キットの検査結果の活用に関するヘルスデザインガイド（ヘルスデザインガイド）の活用について

ヘルスデザインガイドとは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。

【検査結果の活用】
 ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。

【検査結果の活用】
 ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。

【検査結果の活用】
 ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。ヘルスデザインガイドは、遺伝子検査の結果をどのように活用するかを、個人が自由に選択できるようにすることを目的として作成されたガイドです。

ヘルスデザインwith DNA 解析依頼書・同意書


氏名	性別	年齢
1. コノミ	女	30
2. 夫	男	32
3. コノミ	女	3
4. 母	女	55
5. 父	男	58
6. アニマル	犬	10
7. 犬	猫	5
8. 猫	鳥	2




① プライバシー保護説明書
 申込規約書

② 解析依頼書・同意書

④ 遺伝子サンプル試験管

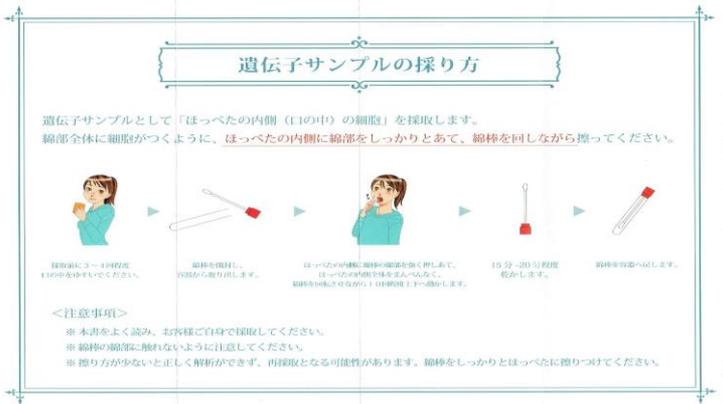


③ 「遺伝子サンプルの採り方」説明書

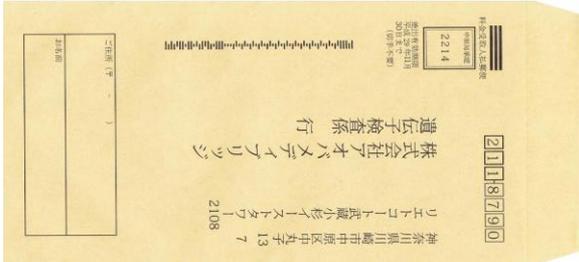

⑤ 返信用封筒

STEP 4

遺伝子サンプルを採取

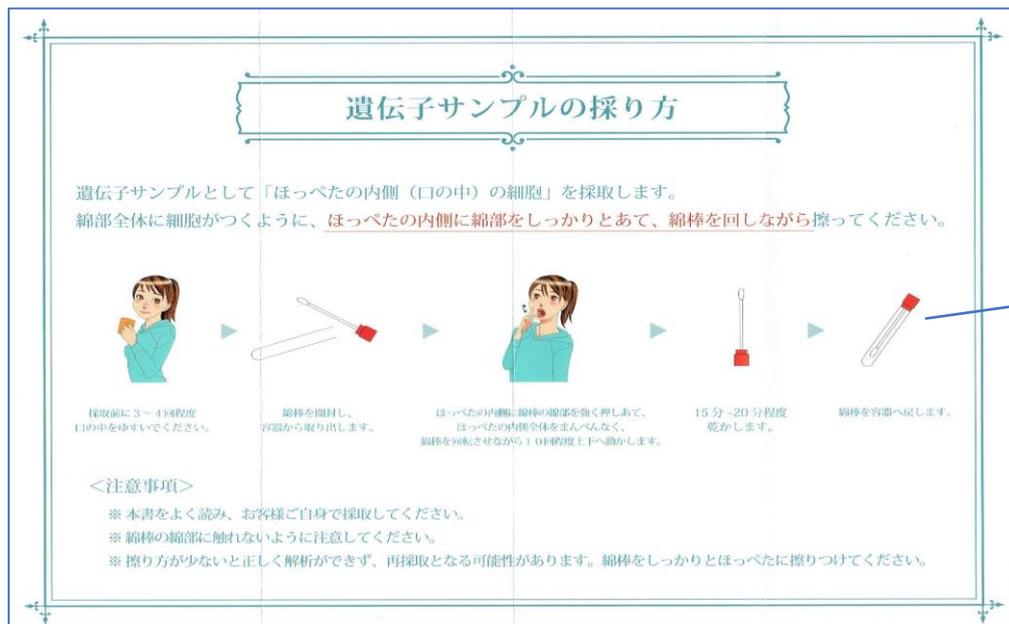

「遺伝子サンプルの採り方」説明書



遺伝子サンプル試験管

- ① 遺伝子検査キットに同梱の「遺伝子サンプルの採り方」の説明書をよくお読み頂いた上、遺伝子サンプルを採取下さい。
- ② 採取した遺伝子サンプルを試験管に保存し、同意書と一緒に返信用封筒に入れポストへご投函下さい。

遺伝子検査のサンプルの採り方

ご注意

☆検査キットは品質保持のため、到着日より一ヶ月以内にご使用ください。


☆採取後の検体は、速やかにご投函をお願いいたします。

☆検査キットはご本人以外は絶対にお手を触れないようお願いいたします。

- ① 採取前に3～4回程度、口の中をゆすいでください。
- ② 試験管を開封し、綿棒を取り出します。
- ③ ほっぺたの内側に綿棒の綿部を強く押し当て、ほっぺたの内訳側全体をまんべんなく、綿棒を回転させながら10回程度上下へ動かします。
- ④ 15分～20分程度乾かします。
- ⑤ 綿棒を試験管に戻し、保管します。



①

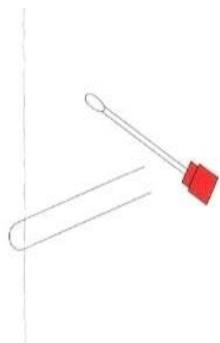

②



③



④



⑤

STEP 5

遺伝子サンプルを返送

ヘルスデザインwith DNA 解析依頼書・同意書

株式会社アオハムデザインリッジ

私は、遺伝子検査の依頼書・同意書に同意の意思表示を記入し、遺伝子検査の目的、方法、予想される検査結果、予想される検査結果についてご本人がご承知した上、私は、遺伝子検査を受ける意思で行い、提供した個人情報を適切に収集し、本サービスに活用し、保存いたします。

検査方法、及びこれに関する検査結果を貴方が十分な理解のもと、個人情報を提供した上で検査方法の向上や検査結果の提供の精度向上等の目的で第三者に提供することになります。

また、検査結果を他の第三者に提供することはありません。検査結果の提供の目的は、検査結果を貴方がご承知の上で提供することです。検査結果を他の第三者に提供することはありません。

申込・同意年月日、西暦 年 月 日

1	フリガナ	
2	氏名	
3	フリガナ	
4	申込者住所	
5	電話番号	
6	メールアドレス	
7	生年月日	西暦 年 月 日
8	性別	男性 女性
9	希望するコースを ○で記入してください。	A【血液・唾液検査キットコース】 B【尿検査キットコース】 C【尿の検査キットコース】 D【唾液検査キットコース】

A【血液・唾液検査キットコース】
※本サービス提供後、検査結果、検査結果の提供は1分以内
※（※）検査結果は、検査結果、検査結果の提供は1分以内


B【尿検査キットコース】
※本サービス提供後、検査結果、検査結果の提供は1分以内

C【尿の検査キットコース】
※本サービス提供後、検査結果、検査結果の提供は1分以内

D【唾液検査キットコース】
※本サービス提供後、検査結果、検査結果の提供は1分以内

株式会社アオハムデザインリッジ HD70070

+

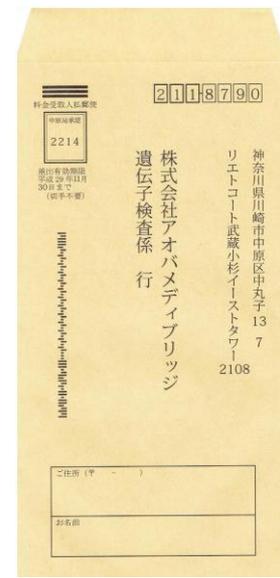


「解析依頼書・同意書」 遺伝子サンプル試験管



同意書と採取したサンプルを封筒に入れご返送下さい。解析メーカーに到着後、解析を行います。

STEP
6

解析結果を確認、アドバイスを受ける

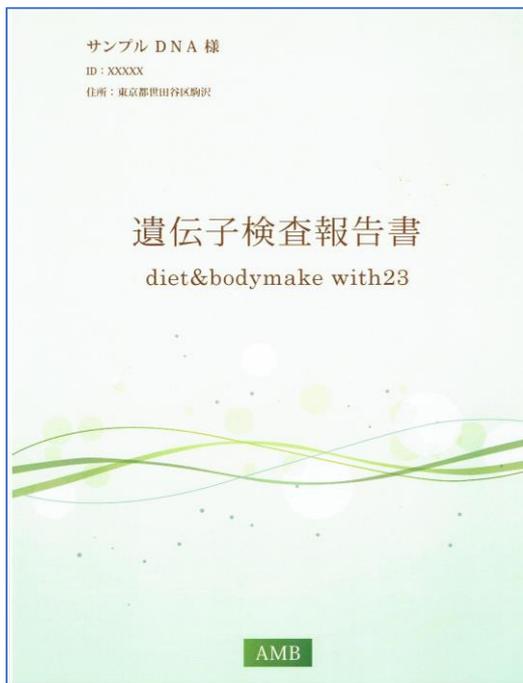

「遺伝子検査報告書」



検査結果を説明、健康相談
を行います。

- ① 4～6週間後、解析完了後、「遺伝子検査報告書」が届きます。Web上でも解析結果を確認できます。
- ② カウンセラーにより、解析結果を説明し健康相談を行います。